


- 4) Przed użytkowaniem sprawdź czy ławeczka jest bezpiecznie zablokowana. Ławeczka nie może być położona niesymetrycznie względem brzegów wanny, a zabezpieczenia nie mogą nie przylegać lub tylko częściowo przylegać do wanny (rys. 2)

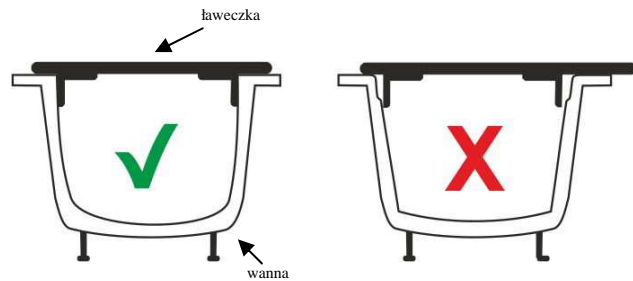

- 5) Powyższą procedurę należy stosować za każdym razem podczas montowania ławeczki na wannie.

UWAGA! Zawsze przed użyciem ławeczki upewnij się, że jest ona prawidłowo i stabilnie zamontowana do wanny.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę ławeczki pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
2. Zaleca się regularne czyszczenie. Ławeczkę należy czyścić miękką szmatką oraz wodą z mydłem.

UWAGA! Do czyszczenia uchwytu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

GWARANCJA

Sprzęt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji. Sprzęt powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie obejmuje:

- czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisaną w instrukcji,
- części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania,
- mechanicznych i termicznych uszkodzeń sprzętu,
- usterek powstałych wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, Nabywca będzie obciążony kosztami realizacji reklamacji.

Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu.

Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYTWÓRCA:

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00,
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

Wydano: 02/2014



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa
www.rehafund.pl

tel. (22) 59 40 300
fax (22) 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁAWECZKA NA WANNĘ RF-850/RF-851/RF-852

Nr katalogowy.:	RF-850	RF-851	RF-852
Max. bezpieczne obciążenie:	181 kg	181 kg	181 kg
Waga własna:	2,0 kg	2,14 kg	2,22 kg
Regulacja szer. mocowania:	500 - 600 mm	500 - 600 mm	500 - 600 mm
Długość siedziska:	660 mm	685 mm	711 mm
Szerokość siedziska:	224 mm	224 mm	224 mm

UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z ławeczki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.



PRZEZNACZENIE


Ławeczka na wannę ma za zadanie zapewnić stabilne siedzisko podczas kąpieli w standardowej wannie. Przeznaczona jest dla osób, które mają problemy, aby nisko usiąść i/lub podnieść się z dna wanny.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Ławeczki nie można montować na wannie gdy gumowe podkładki, znajdujące się na bocznej stronie wsporników nie mają pełnego kontaktu z pionową (lub prawie pionową) ścianą wanny, tak jak to pokazano na rys. 2
2. Należy zawsze przed użyciem ławeczki upewnij się, że jest prawidłowo zamocowana.

MONTAŻ

- 1) Poluzuj motylkowe nakrętki znajdujące się na spodniej stronie ławeczki obracając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Spowoduje to zwolnienie wsporników regulacyjnych (rys. 1).
- 2) Przesuń oba wsporniki maksymalnie do środka ławeczki, a potem połóż ławeczkę na brzegach wanny upewniając się, że ławeczka jest na tyle szeroka, aby bezpiecznie opierać się na brzegach wanny.

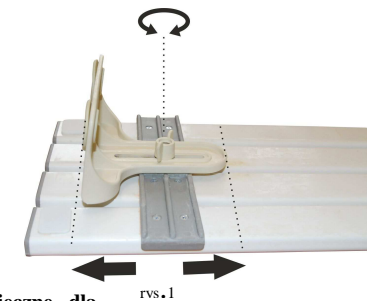


UWAGA! Jeśli z jednej strony ławeczka znacznie wystaje poza brzeg wanny może być to niebezpieczne dla użytkownika i grozić upadkiem.

- 3) Przesuwaj oba wsporniki maksymalnie na zewnątrz, aż zablokują się przy brzegach wanny tak, że ławeczka będzie ściśle przylegać do obu jej brzegów. Mocno dokręć motylkowe nakrętki wsporników.

UWAGA! Zbyt mocne dokręcanie pokręteł motylkowych może spowodować uszkodzenie pokręteł.

- 4) Przed użytkowaniem sprawdź czy ławeczka jest bezpiecznie zablokowana. Ławeczka nie może być położona niesymetrycznie względem brzegów wanny, a zabezpieczenia nie mogą nie przylegać lub tylko częściowo przylegać do wanny (rys. 2)

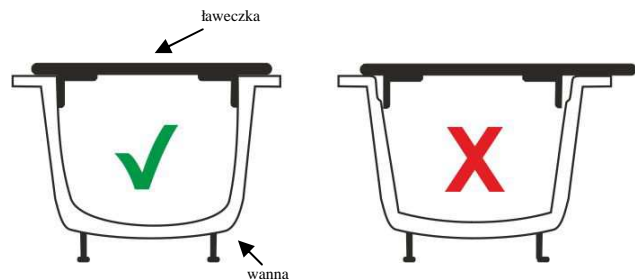

- 5) Powyższą procedurę należy stosować za każdym razem podczas montowania ławeczki na wannie.

UWAGA! Zawsze przed użyciem ławeczki upewnij się, że jest ona prawidłowo i stabilnie zamontowana do wanny.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę ławeczki pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
2. Zaleca się regularne czyszczenie. Ławeczkę należy czyścić miękką szmatką oraz wodą z mydłem.

UWAGA! Do czyszczenia uchwytu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

GWARANCJA

Sprzęt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji. Sprzęt powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie obejmuje:

- czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisaną w instrukcji,
- części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania,
- mechanicznych i termicznych uszkodzeń sprzętu,
- usterek powstałych wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, Nabywca będzie obciążony kosztami realizacji reklamacji.

Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu.

Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYTWÓRCA:

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00,
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

Wydano: 02/2014



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa
www.rehafund.pl

tel. (22) 59 40 300
fax (22) 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁAWECZKA NA WANNĘ RF-850/RF-851/RF-852

Nr katalogowy.:	RF-850	RF-851	RF-852
Max. bezpieczne obciążenie:	181 kg	181 kg	181 kg
Waga własna:	2,0 kg	2,14 kg	2,22 kg
Regulacja szer. mocowania:	500 - 600 mm	500 - 600 mm	500 - 600 mm
Długość siedziska:	660 mm	685 mm	711 mm
Szerokość siedziska:	224 mm	224 mm	224 mm

UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z ławeczki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.



PRZEZNACZENIE

Ławeczka na wannę ma za zadanie zapewnić stabilne siedzisko podczas kąpieli w standardowej wannie. Przeznaczona jest dla osób, które mają problemy, aby nisko usiąść i/lub podnieść się z dna wanny.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Ławeczki nie można montować na wannie gdy gumowe podkładki, znajdujące się na bocznej stronie wsporników nie mają pełnego kontaktu z pionową (lub prawie pionową) ścianą wanny, tak jak to pokazano na rys. 2
2. Należy zawsze przed użyciem ławeczki upewnij się, że jest prawidłowo zamocowana.

MONTAŻ

- 1) Poluzuj motylkowe nakrętki znajdujące się na spodniej stronie ławeczki obracając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Spowoduje to zwolnienie wsporników regulacyjnych (rys. 1).
- 2) Przesuń oba wsporniki maksymalnie do środka ławeczki, a potem połóż ławeczkę na brzegach wanny upewniając się, że ławeczka jest na tyle szeroka, aby bezpiecznie opierać się na brzegach wanny.

UWAGA! Jeśli z jednej strony ławeczka znacznie wystaje poza brzeg wanny może być to niebezpieczne dla użytkownika i grozić upadkiem.

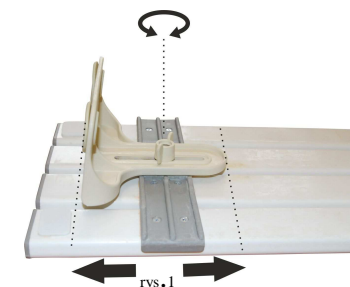

- 3) Przesuwaj oba wsporniki maksymalnie na zewnątrz, aż zablokują się przy brzegach wanny tak, że ławeczka będzie ściśle przylegać do obu jej brzegów. Mocno dokręć motylkowe nakrętki wsporników.

UWAGA! Zbyt mocne dokręcanie pokręteł motylkowych może spowodować uszkodzenie pokręteł.