

**PNEUMATYCZNA MISKA DO MYCIA GŁOWY „EZ-SHAMPOO”****DANE TECHNICZNE**

**PRZEZNACZENIE:** Pompowana powietrzem miska umożliwia łatwe i wygodne mycie głowy pacjentowi ograniczonym do łóżka. Konstrukcja miski pozwala pacjentowi cieszyć się bezpieczną i wygodną kąpielą w łóżku.

**MATERIAŁ:** Miska wykonana jest z bardzo mocnego medycznego winylu.

**WYMIARY:**

- szerokość: 71 cm
- długość: 61 cm
- głębokość po napompowaniu: 15 cm

**GWARANCJA:** 1 rok

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

- 1) Napompuj pojemnik za pomocą ust lub pompy powietrznej.
- 2) Umieść pojemnik pod głową pacjenta.
- 3) Umieść przewód odpływowy powyżej poziomu wody.
- 4) Myj głowę jak zazwyczaj.
- 5) Opłucz włosy.
- 6) Wypuść wodę z pojemnika.
- 7) Wytrzyj ręcznikiem głowę pacjenta.
- 8) Wysusz ręcznikiem pojemnik.

**PNEUMATYCZNA MISKA DO MYCIA GŁOWY „EZ-SHAMPOO”**