


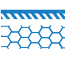
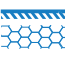

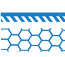
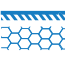







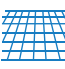


CO?	CZYM?	KIEDY?	JAK?
	<b>higieniczna dezynfekcja rąk</b> desderman pure desderman pure gel desderman N sensiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>przed kontaktem z pacjentem</li> <li>po kontakcie z pacjentem</li> <li>po kontakcie z materiałem organicznym</li> </ul>	Pobrać 3 ml preparatu z dozownika łokciowego przez 30 s. zgodnie z techniką EN 1500.
	<b>higieniczne mycie rąk</b> esemtan emulsja myjąca sensiva emulsja myjąca	<ul style="list-style-type: none"> <li>przed rozpoczęciem pracy</li> <li>po opuszczeniu toalety przed jedzeniem</li> <li>po dłuższych przerwach w pracy kiedy ręce są widocznie zanieczyszczone</li> </ul>	Odpowiednią ilość mydła nanieść z dozownika łokciowego na wilgotne dłonie, umyć zgodnie ze schematem, opłukać, wytrzeć do sucha jednorazowym ręcznikiem. Zamknąć wodę ujmując kurek przez ręcznik papierowy.
	<b>chirurgiczna dezynfekcja rąk</b> desderman pure desderman pure gel desderman N sensiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>przed zabiegiem chirurgicznym</li> </ul>	Na umyte i suche dłonie i przedramiona pobrać z dozownika łokciowego 5 ml środka a następnie wcierać zgodnie z techniką EN 12791 w dłonie oraz przedramiona przez min. 90 s.
	<b>dezynfekcja rąk i skóry</b> kodan wipes	<ul style="list-style-type: none"> <li>przed kontaktem i po kontakcie z pacjentem</li> <li>przed naruszeniem ciągłości skóry</li> </ul>	Wycierać dłonie gotową do użycia chusteczką przez 30 s., nie splukiwać pozostawić do wyschnięcia
	<b>pielęgnacja rąk i skóry</b> esemtan emulsja pielęgnująca sensiva emulsja pielęgnująca sensiva dry skin balm	<ul style="list-style-type: none"> <li>w przypadku częstego mycia rąk</li> <li>po zakończeniu pracy</li> </ul>	Wcierać odpowiednią ilość emulsji w suchą skórę dłoni
	<b>jama ustna</b> octenidol octenisept	<ul style="list-style-type: none"> <li>w profilaktyce infekcji oraz stanów zapalnych jamy ustnej,</li> <li>dezynfekcja błony śluzowej jamy ustnej</li> </ul>	W profilaktyce infekcji oraz stanów zapalnych jamy ustnej płukać lub pędzlować raz dziennie 10 ml preparatu przez 30 s. Dezynfekcja błony śluzowej jamy ustnej przed zabiegami chirurgicznymi płukać lub pędzlować 10 ml przez 30 s.
	<b>dezynfekcja skóry</b> kodan tinktur forte	<ul style="list-style-type: none"> <li>przed iniekcjami</li> <li>przed punkcjami</li> <li>przed cewnikowaniem żył obwodowych</li> <li>przed zabiegami operacyjnymi</li> </ul>	Spryskać skórę z atomizera i odczekać 15 s. Spryskać skórę lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym preparatem odczekać 60 s. Spryskać skórę i odczekać 15 s. Przecierać skórę jałowymi gazikami nasączonymi preparatem, ruchami kołystymi od środka na zewnątrz. Skóra powinna pozostać wilgotna przez 60 s.
	<b>dezynfekcja skóry przed założeniem cewnika centralnego</b> octeniderm	<ul style="list-style-type: none"> <li>przed założeniem cewnika centralnego</li> </ul>	Przecierać jałowymi gazikami nasączonymi preparatem octeniderm. Skóra powinna pozostać zwilżona przez 60 s.
	<b>narzędzia stomatologiczne</b> gigasept instru AF 2% -15 min. gigasept AF forte 2% -15 min. gigazyme Xtra 0,5% - 15 min. chirozan plus - 2% - 10 min	<ul style="list-style-type: none"> <li>natychmiast po użyciu</li> </ul>	Zanurzyć narzędzia natychmiast po użyciu w waniec dezynfekcyjnej w roztworze środka, odczekać wymagany czas. Wyjąć narzędzia na sicie, opłukać wodą demineralizowaną, pozostawić do wyschnięcia. Przygotować do sterylizacji.
	<b>wiertła narzędzia obrotowe</b> rotasept gotowy do użycia	<ul style="list-style-type: none"> <li>natychmiast po użyciu</li> </ul>	Zanurzyć elementy obrotowe w roztworze preparatu w waniec dezynfekcyjnej. Odczekać 15 min. Następnie wyjąć na sicie, opłukać wodą demineralizowaną. Pozostawić do wyschnięcia. Przygotować do sterylizacji.
	<b>endoskopy</b> gigazyme 0,5% - 5 min. gigasept PAA 2% -15 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>natychmiast po użyciu</li> <li>po umyciu</li> </ul>	Wyszczotkować kanały, zanurzyć endoskop w roztworze środka myjącego, wypełnić wszystkie kanały, na zakończenie wypłukać wodą i umieścić w roztworze gigaseptu PAA. Zanurzyć umyte endoskop w 2% roztworze środka na 15 min. Wypełnić wszystkie kanały. Po upływie czasu wypłukać wodą o wysokiej czystości mikrobiologicznej. Użyć natychmiast po dezynfekcji.
	<b>wyciski stomatologiczne</b> perform 2% -15 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>natychmiast po użyciu</li> </ul>	Zanurzyć wyciski w 2% roztworze preparatu. Odczekać 15 min. Wyjąć z waniarki na sicie, opłukać wodą demineralizowaną. Pozostawić do wyschnięcia.
	<b>systemy ssące</b> aspirmatic 2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>dwa razy dziennie</li> </ul>	1,5l 2% roztworu aspirmatic zassać do systemu ssącego i pozostawić na 30 min. Po tym czasie przepłukać system ssący wodą.
	<b>małe powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu</b> mikrozid sensitive liquid mikrozid sensitive wipes schulke wipes zalane 0,5% desam effekt - 15 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. raz dziennie lub wg. potrzeb</li> </ul>	Spryskać a następnie przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia. Przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię a następnie pozostawić do wyschnięcia.
	<b>małe powierzchnie odporne na działanie alkoholu</b> mikrozid AF liquid mikrozid AF wipes	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. raz dziennie lub wg. Potrzeb</li> <li>min. raz dziennie lub wg. potrzeb</li> </ul>	Spryskać i przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia. Przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię a następnie pozostawić do wyschnięcia.
	<b>duże powierzchnie (ściany, podłogi)</b> quartamon med. 2% -15 min terralin protect 0,5% -15 min desam Effekt 0,5% - 15 min	<ul style="list-style-type: none"> <li>raz dziennie po zakończonej pracy</li> <li>raz dziennie po zakończonej pracy</li> </ul>	Przetrzeć powierzchnie za pomocą mopa jednego kontaktu nawilżonego roztworem preparatu quartamon. Pozostawić zwilżone powierzchnie przez 15 min. Przetrzeć powierzchnie za pomocą mopa jednego kontaktu nawilżonego roztworem preparatu terralin. Pozostawić zwilżone powierzchnie przez 15 min.